

MASCHERA NASALE PICO CON BRETELLA DI FISSAGGIO E WHISPER



La maschera nasale PICO è stata concepita per fornire un'interfaccia per la somministrazione della terapia CPAP o bi-level ai pazienti. La maschera è destinata all'utilizzo domestico monopaziente oppure in ambiente ospedaliero/sanitario multi-paziente. La maschera deve essere utilizzata su pazienti (peso >30 kg) ai quali è stata prescritta la terapia CPAP o bi-level.

Note:

- Poiché in questa maschera è incorporata una valvola espiratoria, non è necessario utilizzarne una separata.
- Questa maschera non contiene lattice di gomma naturale o DEHP.

Materiali Utilizzati:

Struttura: policarbonato

Cuscinetto: silicone

Raccordo a gomito: policarbonato

Bretella di fissaggio: tessuto Lycra

N.B. NON E' RILEVATA PRESENZA DI LATTICE NATURALE O DEHP

Pulizia:

Lavare a mano la maschera prima del primo utilizzo. I componenti non in tessuto devono essere lavati a mano tutti i giorni. I componenti in tessuto devono essere lavati a mano settimanalmente.

1. Lavare a mano in acqua tiepida con detersivo liquido per piatti.

Attenzione

- Non usare candeggina, alcol, soluzioni detergenti contenenti candeggina o alcol o soluzioni detergenti contenenti balsamo o idratante.
 - Non asciugare i componenti in tessuto in asciugatrice.
 - Qualunque deviazione dalle istruzioni potrebbe compromettere le prestazioni del prodotto.
 - Ispezionare l'intera maschera alla ricerca di danni o usura (crepe, screpolature, lacerazioni, danni, ecc.).
- Gettare e sostituire eventuali parti, se necessario.

2. Sciacquare accuratamente. Asciugare completamente all'aria prima dell'uso.

Assicurarsi che la maschera sia asciutta prima dell'uso. Asciugare i componenti in tessuto su superficie piana o appesi.

Istruzioni per la lavastoviglie

Oltre al lavaggio a mano, la maschera può essere lavata in lavastoviglie una volta alla settimana.

Attenzione: utilizzare solo un detersivo per piatti liquido per lavare la maschera.

1. Rimuovere il dispositivo di fissaggio sul capo. Non lavare il dispositivo di fissaggio sul capo nella lavastoviglie.
2. Separare il materiale ammortizzante e il telaio e lavarli nel ripiano superiore della lavastoviglie.
3. Asciugare all'aria. Assicurarsi che la maschera sia asciutta prima dell'uso.

Avvertenza: ispezionare la maschera alla ricerca di danni o usura (crepe, screpolature, lacerazioni, ecc.).
Gettare e sostituire eventuali parti, se necessario.