

## RESMED HUMIDIX STANDARD PER AIRMINI



### DESCRIZIONE

HumidX è l'innovativo sistema di **umidificazione** di ResMed specifico per il dispositivo AirMini.

Si tratta di un umidificatore che permette lo scambio di umidità e calore durante l'utilizzo mediante il ciclo inspirazione/espiazione naturale.

**Attenzione:** HumidX è compatibile esclusivamente con AirMini, AirFit P10, AirFit N20, AirFit N20 Classic, AirFit/AirTouch F20 e nessun altro dispositivo o maschera.

La maschera AirFit F20, attualmente, **NON** è compatibile con il sistema HumidX.

### DURATA DI HUMIDX

L' HumidX comincia ad assorbire umidità dall'aria non appena viene estratto dalla sua confezione. E' importante quindi sostituire HumidX dopo 30 giorni al massimo dalla sua apertura, indipendentemente dal fatto che sia stato utilizzato o meno. Dopo un mese, l'efficacia di HumidX comincia a decrescere rapidamente, diventando inutilizzabile in breve tempo.

### COME MONTARE HUMIDX

Montaggio: ruotare delicatamente il punto di connessione posto sul circuito per scollegarlo e dividerlo in due parti. Posizionando la base di colore blu verso il basso, assicurare l'unità HumidX al connettore. Ricollocare il tutto contro il circuito e ruotare in senso opposto per riagganciare il pezzo.

Smontaggio: ruotare delicatamente il punto di connessione posto sul circuito per scollegarlo e dividerlo in due parti. Rimuovere l'unità HumidX ogni 30 giorni per rimpiazzarla con una nuova. Ricollocare il tutto in posizione come spiegato sopra.

## PULIZIA

Smontare ogni parte dell'unità, separando dispositivo da maschera, circuito, HumidX e filtri.

Verificare giornalmente la presenza di danni o blocchi all'unità. Rimpiazzare l'unità dopo 30 giorni dall'apertura della confezione (anche quando non utilizzata). **NON** lavare assolutamente, l'acqua compromette il funzionamento di HumidX.