

## FILTRO ARIA SEFAM S. BOX V2



Filtro Aria per dispositivi Sefam S.box V2.

### **Settimanalmente:**

Filtro lavabile:

- Rimuovere la griglia di aspirazione dell'aria.
- Tirare il filtro verso di sé per rimuoverlo.
- Lavare il filtro con acqua tiepida e un detersivo delicato (ad es. utilizzando una goccia di detersivo per piatti diluito in acqua).
- Risciacquare abbondantemente per eliminare ogni traccia di detersivo.
- Asciugatura del filtro: premere il filtro in un panno assorbente pulito, quindi lasciarlo asciugare completamente al riparo dal sole.
- Una volta asciugato, posizionare il filtro sul retro dell'apparecchio e rimontare la griglia di aspirazione dell'aria. Non utilizzare un filtro parzialmente asciutto.
- Cambiare i filtri non appena sono strappati o macchiati.
- Si consiglia di sostituire il filtro lavabile ogni 6 mesi.